



Ampułki do płukania oczu Plum QuickRinse 5x20ml

Kod towaru:

PBSPL5160

Producent:



Dostępność:

24-48h

Cena netto:

66.98 zł

Cena brutto:

82.39 zł

Ampułki Plum QuickRinse – szybka pomoc i higieniczne płukanie oczu

Zadbaj o bezpieczeństwo wzroku w każdych warunkach dzięki ampułkom Plum QuickRinse. Ten sterylny roztwór chlorku sodu (0,9% NaCl) jest idealnym rozwiązaniem w sytuacjach, gdy do oka dostanie się kurz, pył lub inne ciało obce. Dzięki poręcznej formie ampulek, pomoc jest możliwa natychmiastowo, co minimalizuje ryzyko podrażnień i trwałych uszkodzeń mechanicznych oka.

Dlaczego warto mieć pod ręką ampułki QuickRinse?

- **Sterylność i bezpieczeństwo** – każda ampłka zawiera jałowy roztwór soli fizjologicznej, który jest całkowicie bezpieczny dla delikatnej tkanki oka i zgodny z naturalnym pH płynu łzowego.
- **Uniwersalne zastosowanie** – produkt może być stosowany jako samodzielne wyposażenie apteczki lub jako wymienny wkład do profesjonalnych stacji i dyspenserów pierwszej pomocy marki PLUM.
- **Szybkość i higiena** – jednorazowe opakowanie gwarantuje najwyższy poziom higieny. Po otwarciu ampułki masz pewność, że używasz świeżego i czystego roztworu, gotowego do natychmiastowej aplikacji.
- **Precyzyjne dozowanie** – ergonomiczny kształt ampułki pozwala na kontrolowany strumień płynu, co ułatwia skuteczne wypłukanie zanieczyszczeń nawet w stresujących warunkach.
- **Kompaktowy rozmiar** – ampułki 20 ml zmieszczą się w każdej kieszeni, torbie narzędziowej czy biurowej szufladzie, zapewniając ochronę wszędzie tam, gdzie pracujesz.

Specyfikacja techniczna

Parametr	Wartość
Skład	Sterylny chlorek sodu 0,9% (NaCl)
Pojemność jednostkowa	20 ml
Ilość w zestawie	5 ampułek
Przeznaczenie	Usuwanie ciał obcych, przemywanie ran
Kompatybilność	System Plum QuickRinse / Stacje Plum

Sposób użycia:

- Odkręć końcówkę ampułki, aby ją otworzyć.
- Odchyl głowę do tyłu i delikatnie przemywaj oko jednostajnym strumieniem płynu, starając się mrugać, aby usunąć zanieczyszczenia.
- W przypadku ran powierzchniowych, polewaj miejsce urazu bezpośrednio z ampułki aż do oczyszczenia z brudu.

Wskazówka: Ampułki *QuickRinse* są produktem jednorazowym. Po otwarciu nie należy ich przechowywać do ponownego użycia, aby zachować sterylność zabiegu.

Ważne: W przypadku dostania się do oka substancji chemicznych (kwasów lub zasad) zaleca się użycie płukanki pH Neutral. Jeśli podrażnienie oka utrzymuje się po przemyciu, skonsultuj się z lekarzem.